

Stericup

A chacun sa couleur



Stericup® est un récipient stérile à usage unique de 2,5 ml, développé afin d'éviter l'utilisation de récipients de fortune, ainsi que la réutilisation et le partage du matériel de préparation. Il est décliné en 5 couleurs différentes pour éviter le partage accidentel.

Objectifs

- Promouvoir l'usage unique et personnel de récipients stériles afin de réduire les risques liés à la préparation de l'injection.
- Encourager l'adoption d'une méthode de préparation aseptique et réduire les risques de contaminations bactériennes (abcès, endocardites...) liés à l'utilisation de cuillères, filtres et tampons secs.
- Renforcer, par la couleur, les stratégies d'identification de matériel personnel et réduire les risques de transmission des virus (VIH et hépatites B et C) liés au partage et à la réutilisation des récipients, filtres et tampons secs.

Propriétés

Chaque Stericup® contient :

- **Une cupule stérile :**
 - Capacité maximale de 2,5 ml, permet de chauffer aisément une solution de 1,5 ml.
 - Une surface intérieure plate pour une plus grande stabilité.
 - Alliage aluminium, dont l'innocuité a été démontrée.
 - Grâce à la matière utilisée et la faible épaisseur de cet outil, le Stericup® s'use après une première utilisation de façon à limiter la tentation de réutilisation.
- **Un manche plastique** pour protéger les doigts contre les brûlures.
- **Un filtre coton stérile :**
 - Comparé avec les filtres à cigarettes et certains autres filtres de fortune communément utilisés, la petite taille de ce filtre en coton fait qu'il retient moins de produit.
 - Sa densité élevée assure une filtration plus efficace.
 - Encourage l'usage unique de filtres.
- **Un tampon sec stérile post-injection :**
 - Permet de comprimer la veine après injection pour une meilleure cicatrisation et ainsi de protéger le capital veineux.
 - Permet d'absorber le sang et d'éviter la transmission virale manu-portée.

Histoire Clinique

Le Stericup® a été développé avec le soutien des programmes de réduction des risques en France. Son efficacité et son innocuité ont été validées par des tests en laboratoire. Il a été testé avec l'héroïne «brune » (base) et «blanche » (chlorhydrate), la cocaïne (chlorhydrate), le crack (cocaïne base), les amphétamines, les comprimés et les gélules. Avec le soutien des autorités sanitaires, le Stericup® est distribué dans les pharmacies et les programmes de réduction des risques dans plus de 20 pays à travers le monde.

Stericup® est un dispositif médical portant le marquage CE.



Apothicom

www.apothicom.org