

Sterifilt, un filtre stérile à usage unique



Sterifilt®

Présentation: Blister stérile individuel à usage unique.

Composition: Filtre à membrane en polypropylène s'adaptant aussi bien sur les seringues à insuline à aiguilles serties (Becton Dickinson, BBraun, Terumo, Nevershare, Pic, Chirana) que sur toutes les autres seringues (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, embout Luer).

Propriétés: Sterifilt réduit les risques liés à l'injection de particules, notamment les abcès, les phlébites, les « poussières » et les œdèmes.

Pureté: Élimine 99 % de la totalité des particules de plus de 10 microns.

Rétention: Retient trois fois moins de produit actif qu'un filtre en coton ou en cellulose.

Performance de filtration: optimisée par un très faible volume mort. Efficacité validée en laboratoire.

Indications: Prévention des complications liées à l'injection de particules insolubles. Promotion de l'usage unique des filtres.

Prévention des transmissions virales dans lesquelles le rôle majeur de la réutilisation des filtres a été démontré, l'hépatite C notamment.

Mises en garde: Une deuxième utilisation du Sterifilt est moins efficace et déconseillée.

La filtration n'élimine pas les bactéries, ni les virus.

Essais cliniques: Développé en France depuis 1997 avec le concours des associations de réduction des risques.

Testé avec de l'héroïne brune, de l'héroïne blanche, de la cocaïne, du crack, des amphétamines, des comprimés écrasés tels que le Subutex et des gélules telles que le Skénan, si elles ne sont pas chauffées.

Modalités de manipulation: Introduire l'embout de la seringue dans le Sterifilt.

Effectuer une légère rotation associée à une légère pression.

Avec les seringues Nevershare et BBraun, un « clic » supplémentaire signale que le montage est correct.

Tenir verticalement.

Aspirer lentement.

Sterifilt® est un dispositif médical stérile portant le marquage CE.

Sterifilt

www.apothicom.org

Sterifilt®

Bon de commande

Complétez ce bon de commande et faxez-le à :

APOTHICOM-Distribution/52 avenue Edison. 75013 Paris. FRANCE

Tél.: 01 53 61 18 41. Fax: 01 53 61 04 49. E-mail: infos@apothicom.org

Remplir en lettres capitales.

Nom : Prénom :

Organisation : Fonction :

Adresse de livraison :

Adresse de facturation (si différente) :

Téléphone : Fax :

E-mail : @

N° de Tva intracommunautaire (pays de l'U.E.):

Pour faciliter les commandes Sterifilt® est disponible par multiples de 1 000. Pour des quantités importantes, ou si la commande est très urgente, merci de nous contacter par téléphone. Votre commande vous sera livrée par colis postal sous cinq jours ouvrables.

Nous avons intégré Sterifilt® dans le dispositif Stericup: les deux éléments ainsi associés portent la désignation de Sterimix®. Dès lors il est possible de commander Sterifilt soit séparément, soit inclus dans le Stericup.



Sterifilt® sous blister individuel				Quantité	Total
De 1 000 à 5 000	Le mille	120,00 € HT	143,52 € TTC		
6 000 et plus		115,00 € HT	137,54 € TTC		
Sterifilt® mode d'emploi	10 par 1000	⇒gratuit			⇒gratuit
Sterifilt® Poster	1 par 1000	⇒gratuit			⇒gratuit
Cartes de prévention Sterifilt®	10 par 1000	⇒gratuit			⇒gratuit
				Total (Port non inclus):	

Sterimix® (Stericup® + Sterifilt® + manche + tampon sec)				Quantité	Total
De 1 000 à 5 000	Le mille	195,00 € HT	233,22 € TTC		
6 000 et plus		190,00 € HT	227,24 € TTC		
				Total (Port non inclus):	

Tous les prix s'entendent hors port. Le taux de TVA applicable à Sterifilt et Sterimix est de 19,6 %.

*Vers les pays de l'Union Européenne, la TVA sur les produits n'est pas appliquée si le numéro de TVA Intracommunautaire de l'organisme nous est communiqué.

Règlement à réception de facture, par virement ou par chèque à l'ordre d'Apothicom Distribution.

Date :

Signature :

Banque

Nom : Apothicom Distribution

IBAN : FR76 3000 4003 1700 0100 6193 565

BIC : BNPAFRPPBY

Pour plus d'information • e-mail : infos@apothicom.org ;

site : www.apothicom.org

Date de mise à jour : mai 2009. Merci de ne pas utiliser les versions antérieures.